


# Notice technique d'utilisation du D.E.A Fred PA-1

## Description du D.E.A FRED PA -1



ZOOM 9 : Diodes informant de l'état de l'appareil

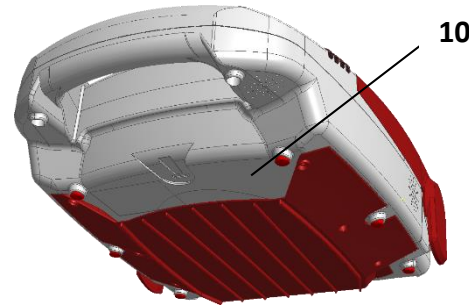

- Activité du Modem
- Remplacer la batterie
- Maintenance requise
- Remplacer les électrodes



1. Ouvrir le capot pour la mise en marche automatique du D.E.A
2. Indication du numéro d'urgence à composer (112)
3. Electrodes de défibrillations pré-connectées
4. Connecteur du câble des électrodes pré-connectées (avec Tag RFID)
5. Pictogrammes explicatifs avec diodes indiquant l'étape de réanimation
6. Indicateur lumineux de délivrance du choc électrique (pour version entièrement automatique)
7. Bouton permettant de répéter les messages vocaux (en option : multilingue)
8. Indicateur lumineux de fonctionnement général de l'appareil (clignote en vert appareil en veille)
9. Diodes informant de l'état de l'appareil (voir ZOOM)
10. Emplacement 2<sup>e</sup> paires d'électrodes de défibrillation

## ETAPES DE LA CHAINE DE SURVIE



SAMU



Pompiers



Toutes urgences

1. Appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112
2. Ouvrir le capot de l'appareil pour le mettre en route et suivre les indications
3. Ouvrir le sachet d'électrodes, les coller sur la poitrine de la victime et brancher le connecteur dans le DEA (si nécessaire)
3. Continuer de suivre les instructions vocales (ou texte) du défibrillateur

*Le choc électrique ne sera proposé que si l'appareil l'autorise : Dans ce cas, le DEA réalise un décompte de 3 secondes et délivre le choc automatiquement.*

4. Continuer à suivre les instructions du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours.



**SCHILLER**

FRANCE S. A. S